



ÓVSZER TESZTCSOMAG – HASZNÁLATI INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A TERMÉKEKRŐL

Az Óvszer Tesztcsomag egy speciális, egyedileg létrehozott összeállítás a Hormonmentes.hu-tól. Azért alkottuk meg, hogy elérhető áron, ugyanakkor Hozzátok igazodva kínáljunk egy „próbacsomagot”, amely jó alap lehet ahhoz, hogy kiválasszátok a számotokra megfelelő óvszerfajtát. A választékban megtalálható a Hormonmentes.hu teljes kínálata: 6 márka több mint 10 típusú óvszere. A csomag nem fedi le a teljes óvszerpiacot, ugyanakkor a főbb változatokat igen: ha ezek között nem találjátok meg az igazit, akkor nem biztos, hogy érdemes óvszerben gondolkoznotok, mint védekezési opció – de legalábbis semmiképp sem érdemes a hagyományos termékek között keresgélni. A csomaghoz mellékelt értékelőlap célja, hogy megkönnyítsétek a választást: feljegyezhetitek, hogy milyen tapasztalataitok voltak az egyes típusokkal, és mely termékeket találjátok a legjobbnak.

MILYEN ÓVSZEREK VANNAK A KÜLÖNBÖZŐ CSOMAGOKBAN?

- **SLIMFIT (S) CSOMAG: 46–54 mm névleges méret, 5 márka, összesen 8 db óvszer** – 3 db Mister Size (47-es, 49-es és 53-as méret), 2 db Glyde (Slimfit és Ultra), 1 db Lelo HEX Original, 1 db Skyn Original, 1 db Dr. Müller óvszer
- **MEDIUM (M) CSOMAG: 51–58 mm névleges méret, 6 márka, összesen 13 db óvszer** – 3 db Mister Size (53-as, 57-es és 60-as méret), 2 db Glyde (Ultra és Maxi), 2 db Lelo HEX (Original és Respect), 2 db Skyn (Original és Large), 1 csomag Unique (3 db), 1 db Dr. Müller óvszer
- **LARGE (L) CSOMAG: 58–69 mm névleges méret, 5 márka, összesen 10 db** – 3 db Mister Size (60-as, 64-es és 69-es méret), 2 db Glyde (Maxi és Supermax), 1 db Lelo HEX Respect, 1 db Skyn Large, 1 csomag Unique (3 db)

MIT ÉRDEMES TUDNI AZ EGYES MÁRKÁKRÓL?

Az alábbiakban pár szóban összefoglaljuk, hogy mik az egyes márkák fő jellemzői, a márkák további specifikus tulajdonságairól weboldalunk termékoldalain olvashatsz bővebb információkat.

- **Dr. Müller** – teafaolajos, fertőtlenítő hatású latex bioóvszer
- **Glyde** – prémium minőségű vegán latex óvszer, amely 4 méretben kapható
- **Lelo HEX** – speciális hatszögletű, hálós szerkezettel kialakított prémium latex óvszer, 2 méretben
- **Mister Size** – 7 méretben elérhető vegán latex óvszer
- **Skyn** – latexmentes, prémium minőségű óvszer szintetikus poliizoprénből, 2 méretben
- **Unique** – latexmentes, polietilén anyagból készült prémium óvszer

II. MENNYIRE BIZTONSÁGOSAK AZ ÓVSZEREK?

Az óvszer helyes használata segít megelőzni a nem kívánt terhességet, valamint a HIV/AIDS és más szexuális úton terjedő fertőző betegségek átvitelének kockázatát, ugyanakkor egyetlen fogamzásgátló módszer sem 100%-ban biztonságos. A fogamzásgátló módszerek biztonságosságát a Pearl-index alapján számítják ki. Az óvszer Pearl-indexe 2–12, ami azt jelenti, hogy 100 nőből, aki egy éven keresztül óvszert használ, 2–12 esik teherbe. Az, hogy például a fogamzásgátló tablettákkal összehasonlítva az óvszer kevésbé jó a mutatóban, az a legtöbb esetre vonatkozóan felhasználói, alkalmazási hiba miatt alakul így. A megfelelő méret és típus kiválasztása ennek esélyét csökkenti. Az olyan nemi úton terjedő betegségek, mint a HIV, a szifilisz, a gonorrhoea, a hepatitis B és a hepatitis C elleni védelmet illetően azonban az óvszer magas szintű védelmet nyújt minden más fogamzásgátló módszerrel szemben.



III. TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVSZEREK ELSŐ HASZNÁLATA ELŐTT

1. Ha további síkosításra van szükségetek, használjatok víz alapú síkosítót! **Az óvszerekhez NE használjatok olaj alapú síkosítót**, mivel károsíthatja a gumióvszer anyagát (a Unique óvszer kivétel, a többivel ellentétben ez használható olaj alapú síkosítóval is! Ez vonatkozhat néhány helyi alkalmazású gyógykészítményre is, amit a pénisz vagy a hüvely területén szükséges alkalmazni. Bizonytalanság esetén feltétlenül konzultálj kezelőorvosoddal vagy gyógyszerésszeddel!
2. Ne használd az óvszert, ha a gumi anyaga ragacsos vagy repedezett, vagy ha a spermiumtartály láthatóan sérült!
3. **Az óvszer hűvös és száraz helyen tárolandó, ne tedd ki közvetlen napfénynek!**
4. A gumióvszerek kizárólag egyszeri használatra szolgálnak, az újra felhasznált óvszer nem véd megfelelően a nem kívánt terhességtől és a fertőzések kockázatától!
5. Mindig ügyelünk a termékek hosszú lejáratú idejére, ám egyedi összeállítás lévén a termékek javasolt használati ideje különbözik! **Fontos, hogy mindig ellenőrizd a csomagoláson az adott óvszer lejárátát! Ha a csomagoláson nem látod a lejárát dátumot, akkor javasoljuk, hogy a vásárlástól számolt egy éven túl NE használd az adott terméket!**
6. A termékek egy része természetes latexet tartalmaz (kivétel: Skyn, Unique), amely helyi allergiás reakciókat okozhat. Ha allergiás vagy a természetes latexre és használtad a terméket, fordulj a kezelőorvosodhoz!
7. Az óvszereket kisgyermekektől tartsd távol!
8. Az óvszer orális használata esetén fokozódhat a légszomj vagy fulladás kockázata.
9. A lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 72 órán belül kérj orvosi segítséget, ha az óvszer aktus után szivárog, vagy aktus közben elszakadt.
10. Az óvszerek megfelelnek az ISO 4074/EN ISO 4074 nemzetközi szabványnak. Az óvszer használata kapcsán bekövetkezett minden súlyos eseményt jelenteni szükséges a gyártónak vagy az adott ország illetékes hatóságának, illetve vedd fel velünk a kapcsolatot az info@hormonmentes.hu email címen!

IV. ÚTMUTATÓ AZ ÓVSZEREK HELYES FELHELYEZÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ

1. Minden esetben óvatosan tépjétek le a fóliát, ügyelve arra, hogy ne sértsétek meg a gumióvszert!
2. A fóliából történő eltávolítás során ügyeljete arra, hogy a körmök, ékszerek stb. ne sértsék meg az óvszert.
3. Óvatosan nyomd össze a gumióvszer végét a hüvelyk- és mutatóujjad között, hogy nyomd ki a levegőt az óvszer spermiumtartályából, miközben a merev pénisz makkjára helyezed. A nem kívánt terhesség és szexuális úton terjedő betegségek megelőzése érdekében mindenképpen az aktus megkezdése előtt szükséges ezt elvégezni!
4. Miközben tartod az egyik keziddel a gumióvszer csúcsát, görgessétek le az óvszert a merev pénisz teljes hosszán!
5. Ellenőrizétek, hogy az óvszer nem túl laza vagy túl szoros-e, ami esetleges szakadáshoz vezethet.
6. Az ejakulációt követően az óvszer peremét fogd meg és így húzd ki lassan a péniszt, hogy az óvszer ne csússzon le!
7. A péniszről lassan lecsúsztatva távolítsd el a gumióvszert. Fontos, hogy ezután a pénisz vagy a használt óvszer már ne érintkezzen a hüvellyel! A már használt óvszer újra nem felhasználható!
8. A használt óvszert csomagoljátok össze, majd dobjátok a kommunális hulladékba (semmiképp sem javasolt a wc-be!).

Az egyes termékek gyártói információit megtalálod a Hormonmentes Webshop termékoldalain.

Forgalmazó: HoMe Kreatíva Kft., 2133 Sződliget, Kossuth u. 5., info@hormonmentes.hu