

Oralsafe nyalókendő – Használati utasítás

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást és tartsa meg!

Az Oralsafe egy védőréteggel funkcionáló latex/poliuretán anyagból készült kendő, ami orális-genitális kontaktus során használható. Orális szex során a kendőt a hüvelyi vagy anális területre szükséges helyezni, így megakadályozza a száj és a nemi szervek közötti közvetlen érintkezést, ezáltal a nemi úton terjedő betegségek, STD-kórokozók terjedését.

Alkalmazás

Óvatosan hajtsa szét a kendőt. Nedvesítse be a hüvelyi vagy anális testrészt vízbázisú síkosítóval. Helyezze a területre úgy, hogy teljesen befedje a hüvelyt és a csiklót, vagy a végbélnyílást! Tartsa a kendőt a helyén orális-genitális kontaktus közben! A használt kendőt dobja a szemétkébe, ne húzza le a WC-n!

Ne vágja szét a kendőt! Egy kendőt csak egyszeri alkalommal használjon! Használat előtt ellenőrizd a lejárat dátumot! Ne használj ragacsos, szakadt vagy sérült kendőt! Amennyiben Ön vagy a partnere hüvelyben alkalmazandó gyógyszeres készítményt használ, konzultáljon a használatról kezelőorvosával. Ellenjavallat: poliuretán-allergia vagy latexallergia esetén!

Anális területen való használat után mindig használjon új Oralsafe kendőt a hüvelyi területen!

Az aktust megelőzően egy órával, illetve után kb. egy óráig nem javasolt a fogmosás, ugyanis a fogkefe mikroszkopikus karcolásokat ejt az ínyen, amik segíthetik a kórokozók továbbterjedését, a fertőzés burjánzását.

Ellenjavallat: poliuretán-allergia vagy latexallergia esetén ne használja a terméket!

Tárolás: hűvös és száraz helyen, közvetlen napfénytől védve!

Csomagolás: 8x1 db. Az egyes darabok mérete: 15x25,5 cm.

GYÁRTÓ	FORGALMAZÓ
KESSEL Medintim Gmbh. (Németország) 64546 Mörfelden-Walldorf Kelsterbacher Straße 28.	HoMe Kreatíva Kft. – Hormonmentes.hu 2133 Sződliget Kossuth Lajos u. 5. info@hormonmentes.hu